

# トーキングエイトライトではなしましょう

## さわってみましょう

- ・ 話したい文字のキーを順番に押して文を作成してください。🗣️を最後に押すと発声されます。
- ・ 「ば」、「ぱ」などの濁音・半濁音は、**は**の次に **ゝ** か **゜** で入力できます。
- ・ 小さい「っ」「ゃ」などは、**シフト**の次に **つ** か **や** で入力できます。
- ・ カタカナで入力したいときは、**ひ Aカ** で文字モードを変えられます。
- ・ 間違えたときは、**↶** (戻る) で左にある文字を消すことができます。すべて消したいときは、

**C** を押します。

## 便利な機能

- ・ 「はい」「いいえ」の場合は **はい** か **いいえ** で、話し中でもすぐに返事ができます。
- ・ **📶** を押すと、大きなチャイムが鳴って人を呼ぶことができます。
- ・ **🔄** を押すと、画面が逆になって向き合った人に見えた内容を見せられます。

## かくしゅせってい 各種設定

- ・ 音声は男性と女性の二通りです。設定を変えるには、**H**の次に **1+** を押して「キーのおと」画面を開き、**2-** を押すと男性音は女性音に、女性音は男性音になります。
- ・ 音が大きすぎるか小さすぎる場合は、**H** を押して補助機能の画面にします。**2-** を押して「おんせい」、つぎに **1+** で「おんりょう」を選択します。**↑** や **↓** または、**0** から **8.** で音量の調整ができます。
- ・ よく使う言葉を登録しましょう。例えば「トイレにいきたい」を **と** に登録すると、**★** と **と** を押してすぐに呼び出して使うことができます。(取扱説明書43ページ参照)